



–Máscara de protección


— Instrucciones de armado

Modelos

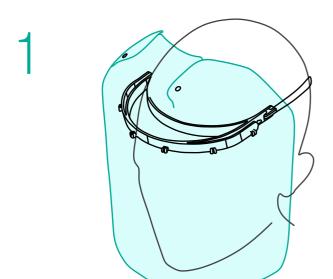

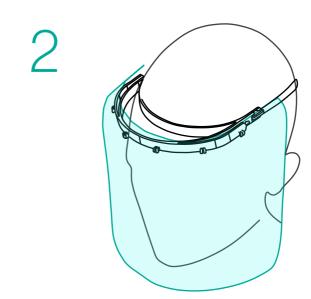

Componentes

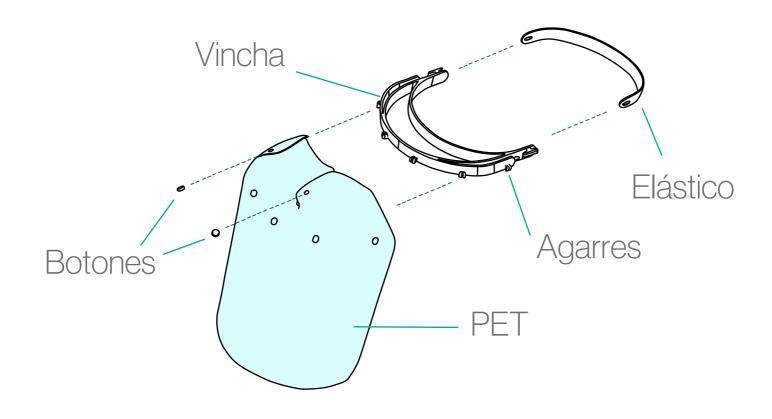


Protocolo para desinfección

Fórmula/soluciones

Se pueden usar 2 tipos de desinfectantes diferentes, con sus correspondientes proporciones. Todas las disoluciones desinfectantes son de base de agua.

Con LEJÍA / LAVANDINA

Proporción para 1 litro de desinfectante con lejía, lavandina o cloro de concentración 0.5%

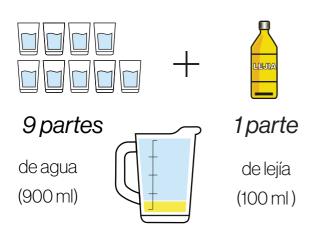

Con ALCOHOL 96º

Proporción para 1 litro de desinfectante con alcohol 96º concentración 70%




Aplicación


Desinfección básica

- 1 Desarmar la máscara y retirar el elástico
- 2 Sumergir en la solución durante 1 minuto.

Para su distribución

- 1 Repetir pasos de desinfección
- 2 Introducir en contenedor correspondiente
- 3 Entregar al responsable autorizado

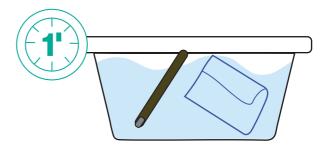

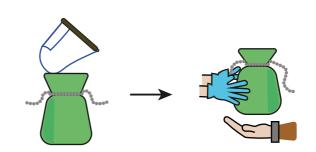

Recomendaciones al uso: preparar una nueva mezcla en cada uso. Utilizar recipientes cerrados. Utilizar agua fria. No mezclar con acidos (vinagre) ni bases nitrogenadas (amoniaco). No usar en metales (corrosivos)